



Windows 10、及び8.1環境をご利用の方は、本システムをご利用いただく場合、OSの設定変更が必要になります。
以下に沿って設定を変更してください。

◆Windows 10環境をご利用の方


1. パソコンに歩数計を接続してください。
2. Windows 10 のタスクバーにある検索ボックスを選択します。

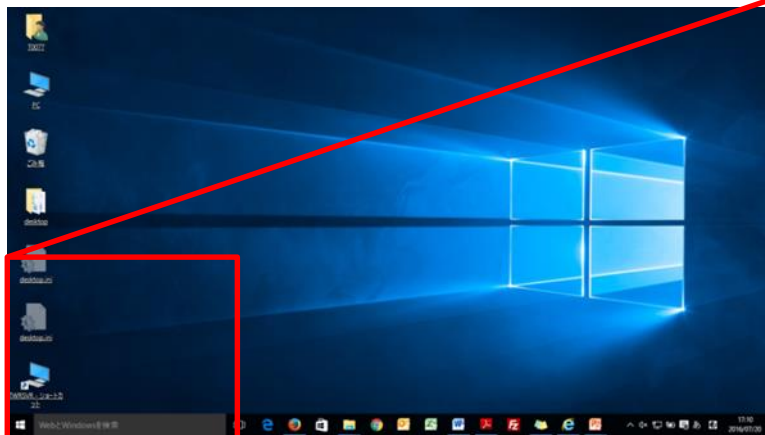

3. 半角で"regedit"と入力し、キーボードの [Enter] キーを押します。
4. 検索にヒットした「regedit」（レジストリ エディター）を選択します。

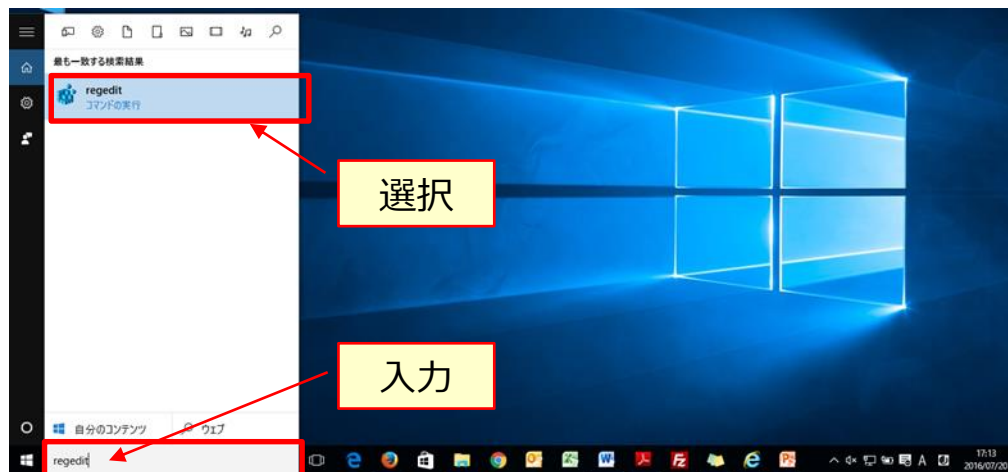


5. 以下の画面が表示されたら、[はい] を選択します。

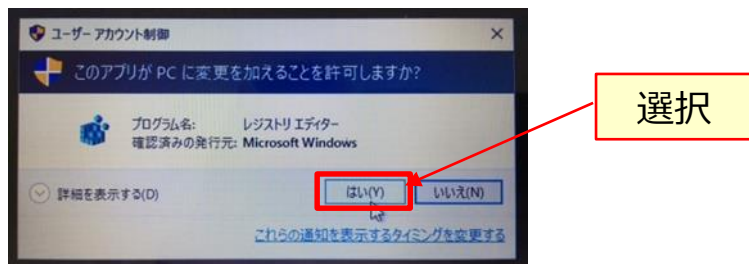


6. 以下の項目名をダブルクリック、もしくは右クリックから「展開する」を選択し、展開します。
 HKEY_LOCAL_MACHINE
 → SYSTEM
 → CurrentControlSet
 → Enum
 → USB
 → VID_0590&PID_0028
 → 5&fc58bd7&0&2 ※ お使いのパソコンによって値が異なります。
 → Device Parameters
7. Device Parameters の「EnhancedPowerManagementEnabled」をダブルクリック、もしくは右クリックから「修正」を選択します。

項目名の選択を間違えないよう
 ご注意ください！

※ お使いのパソコンによって値が異なります。

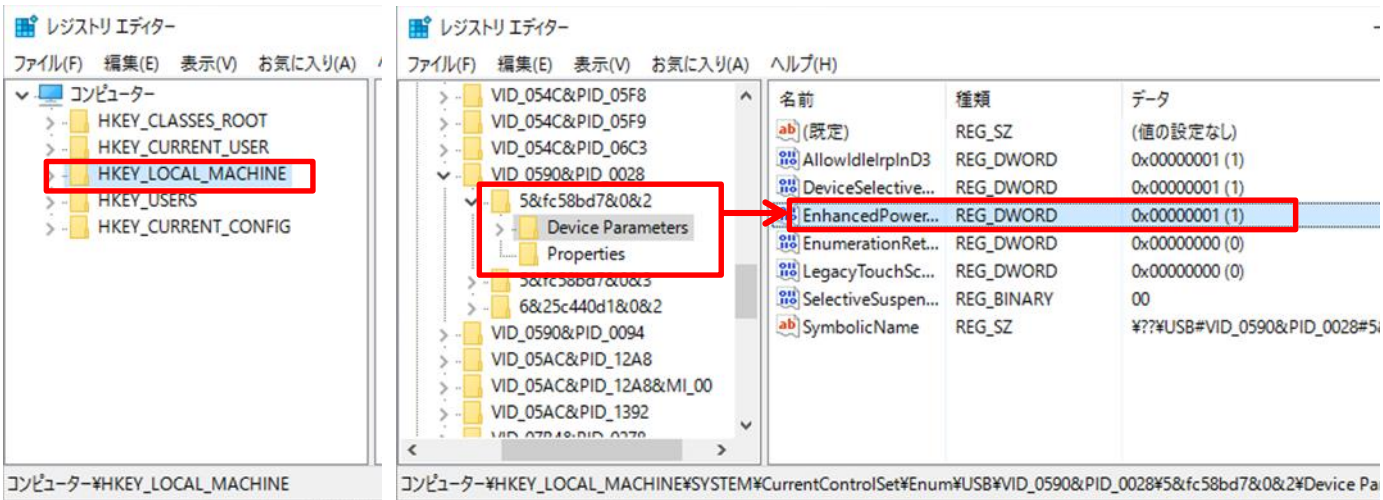

8. 値のデータを“1”から“0”に変更して「OK」をクリックして終了させます。
 一度歩数計をUSBポートから外し、再度接続して歩数計でログイン、歩数計データの取り込みができれば完了です。

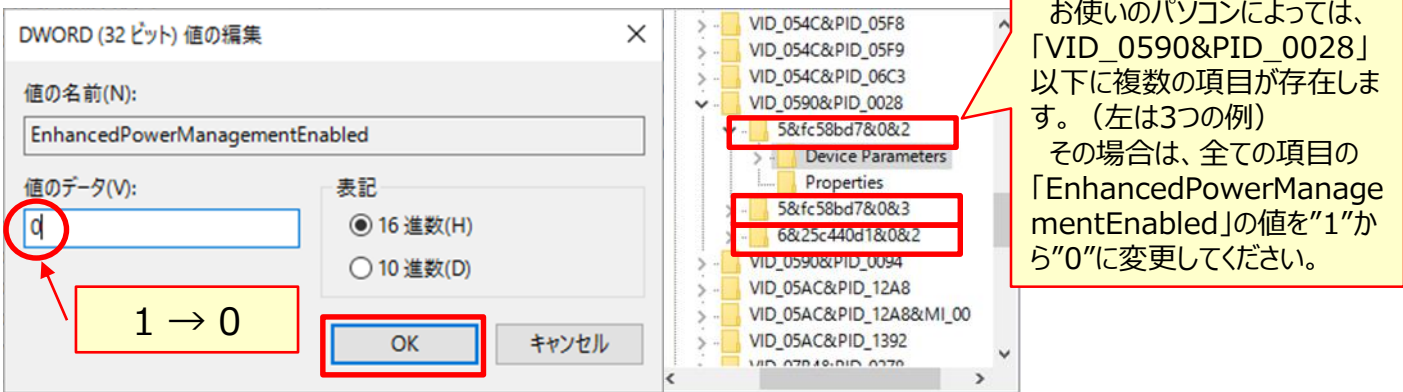

お使いのパソコンによっては、「VID_0590&PID_0028」以下に複数の項目が存在します。（左は3つの例）
 その場合は、全ての項目の「EnhancedPowerManagementEnabled」の値を“1”から“0”に変更してください。




WindowsUpdateやブラウザの自動更新により、再設定が必要な場合がございます。



Windows 10の標準ブラウザである「Microsoft Edge」には対応していません。
 従来の「Internet Explorer 11」をご利用下さい。

◆Windows 8.1環境をご利用の方

1. パソコンに歩数計を接続してください。
2. マウスのポインタを画面の一番右端まで持っていき、「検索」を選択します。

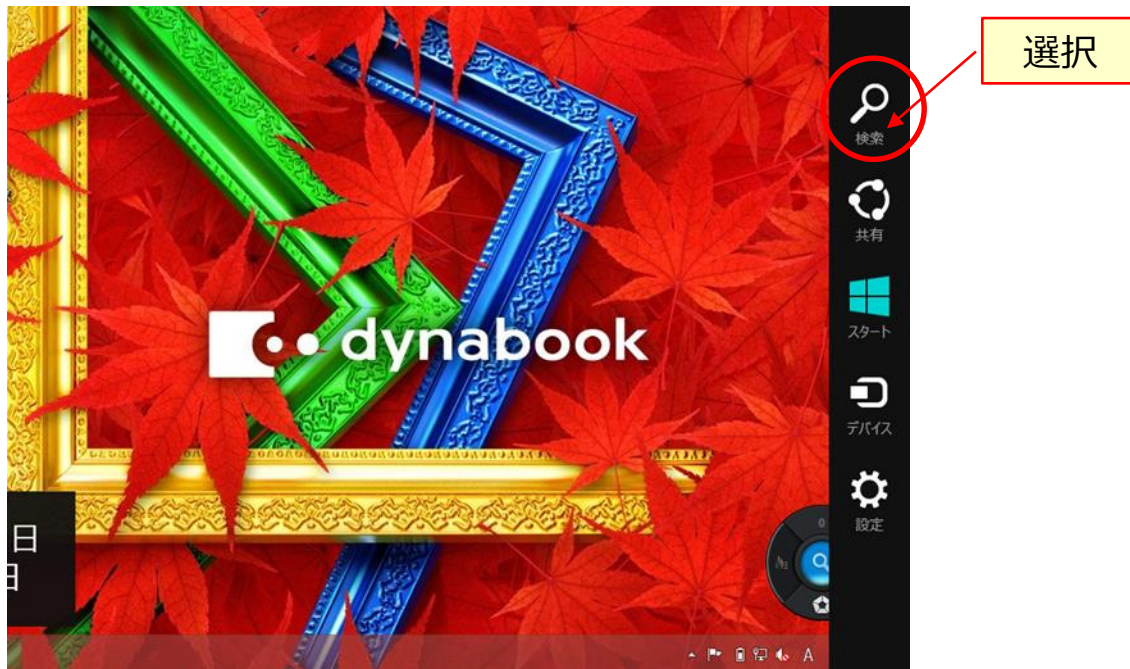

3. 「regedit.exe」と検索し、レジストリ エディターを選択し、起動します。




- 以下の項目名をダブルクリック、もしくは右クリックから「展開する」を選択し、展開します。
 HKEY_LOCAL_MACHINE
 → SYSTEM
 → CurrentControlSet
 → Enum
 → USB
 → VID_0590&PID_0028
 → 5&2dc22d9e&0&1
 → Device Parameters


項目名の選択を間違えないよう
 ご注意ください！

※ お使いのパソコンによって値が異なります。

- Device Parameters の「EnhancedPowerManagementEnabled」をダブルクリック、もしくは右クリックから「修正」を選択します。

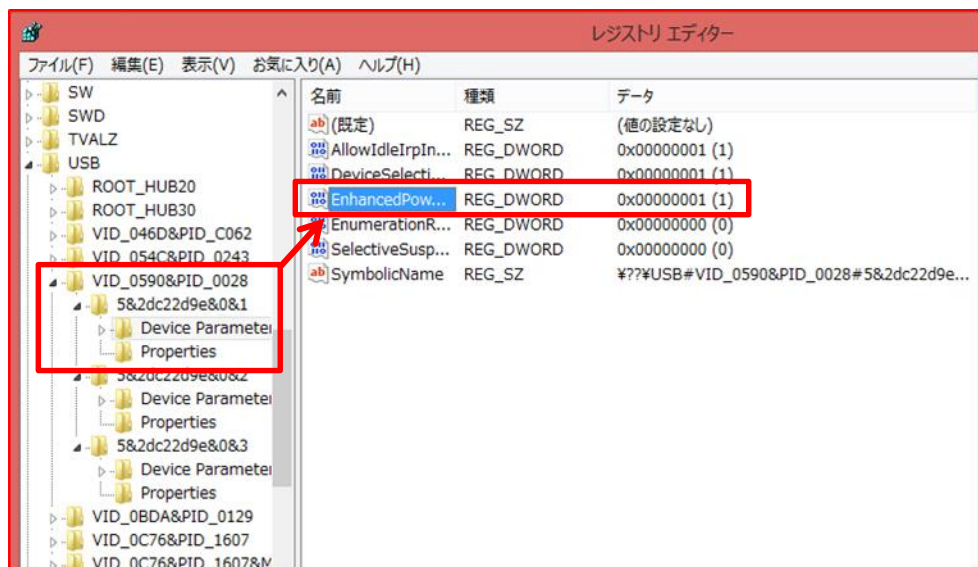

- 値のデータを「1」から「0」に変更して「OK」をクリックして終了させます。
 一度歩数計をUSBポートから外し、再度接続して歩数計でログイン、歩数計データの取り込みができれば完了です。

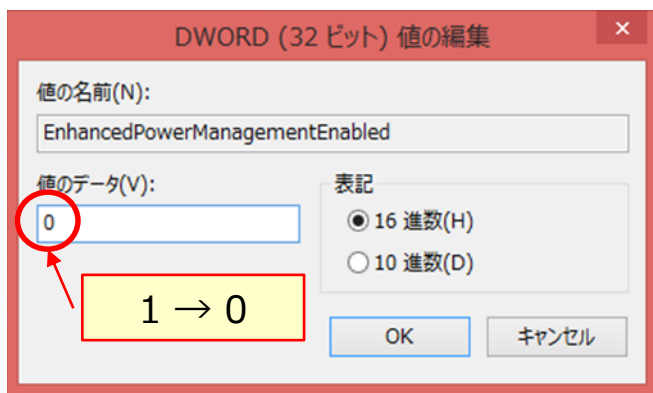

お使いのパソコンによっては、「VID_0590&PID_0028」以下に複数の項目が存在します。(左は3つの例)
 その場合は、全ての項目の「EnhancedPowerManagementEnabled」の値を「1」から「0」に変更してください。



WindowsUpdateやブラウザの自動更新により、再設定が必要な場合がございます。

2018年4月12日
 (株) つくばウエルネスリサーチ